

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年9月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300277
作業年月日	平成30年9月18日	作業時間：1時間30分
顧客名	伊木診療所 様	TEL：086-429-2300
所在地	岡山県倉敷市亀山775-1	院長 様
販売店	有限会社マツモトメディカル	松本 様
納入年月日	平成26年6月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目 定期点検シール記入 ☒	出張・引取
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 386
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 63	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒： 7	殺菌/消毒+7L： 3/5
	リークチェック： 1	自己洗浄： 311	アルコール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2018 年 9 月 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

倉敷市亀山 伊木診療所
院長 伊木 勝道

責任技術者	作業者
伊木 勝道	井上