

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

11-08585

No. 181008

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	前谷内科クリニック 様		機番	300645
環営	所在地	岡山県井原市西江原666-1		納入日	平成27年09月28日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成30年08月09日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成30年10月04日

修理依頼・不具合内容

浸水による各部点検

※キャストの所まで浸水した

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

内部点検したところ、機械の下側にある機器は浸水による影響はありませんでした。
このほかに保守点検と劣化した部品の交換を実施しました。

写真1：定期交換部品

写真2：基板、マニホールド周辺チューブ



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：947→2 殺菌：478、殺菌+アルコール：476、リークチェック：469
自己洗浄：424、アルコール単独：6、エア単独：4

—以上—

承認
若井
18.10.08
審査
中澤
18.10.8
作成
H30.10.8
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1式	
2	コントロール基板	1枚	
3	マニホールド周辺チューブ	1式	
4	アルコールタンクキャップ	1個	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528