

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年11月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300513
作業年月日	平成30年11月15日		作業時間：60分
顧客名	石川ヘルスクリニック 様		TEL：0880-22-0002
所在地	高知県高岡郡四万十町榑山町7-23		院長 様
販売店	株式会社末徳屋医療器店 中村出張所		松元 様
納入年月日	平成27年3月13日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 470
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐			
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数：361	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒：623	殺菌/消毒+アル：837
	リークチェック：504	自己洗浄：756	アルコール単独：1	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	〒786-0003 高知県高岡郡四万十町榑山町7-23
	石川ヘルスクリニック 医師 石川 哲
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 田村
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	TEL 0880(22)0002 FAX 0880(22)4317

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者