

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年11月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301012
作業年月日	平成30年11月28日		作業時間： 時間 20分
顧客名	勝北すこやかクリニック 様		TEL：0868-29-7701
所在地	岡山県津山市坂上221-1		院長 様
販売店	株式会社津山エムアイ		国米 様
納入年月日	平成28年11月14日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 599
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 429	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 344	殺菌/消毒+アル： 548
	リークチェック： 4	自己洗浄： 430	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター		☒	1

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	2018 年 11 月 28 日
	医療法人 勝北クリニック 勝北すこやかクリニック
	ご署名 島居 忠良 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8 TEL：086-235-0323	責任技術者	作業者
		