

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和元年 9月 11日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500001	
作業年月日	令和元年 9月 11日		作業時間	60	Hr
顧客名	安藤内科医院 様		TEL	0875-72-5018	
所在地	香川県三豊市高瀬町上勝間1654-1		ご担当	様	
販売店	有限会社天王屋商事		北岡	様	
納入年月日	2018年 9月 13日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2019年 保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 502x1 35.9 MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 716
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0302 / T11A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした	

装置 情報	交換後運転回数：78→0 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数)：4 / 消毒 (洗剤洗浄あり)：1	
	消毒+アル (総運転回数)：77	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)：77	
	リークチェック：1	自己洗浄：67	アルコール単独：0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒
交換後 No. 13031333			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	大倉 34 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	川上 中澤