

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：301353
作業年月日	平成31年2月26日	作業時間：60
顧客名	石川内科胃腸科医院 様	TEL：087-867-1000
所在地	香川県高松市松縄町48-2	院長
販売店	富士フイルムメディカル株式会社	堤
納入年月日	平成30年3月8日	保証期間 内 □ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒
<u>出張・引取</u>	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルズ数 436
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 071 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：635	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：281	殺菌/消毒+7L：356
	リークチェック：459	自己洗浄：0	7L単独：57	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用ケーブル		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水ケーブル		☒	

お客様ご確認署名欄

※内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

石川 哲也

印

年 月 日

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

倉

作業者

川上