

保守点検・修理 報告書

発行日: 令和元年10月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300951
作業年月日	令和1年10月23日		作業時間: 1時10分
顧客名	うえの内科小児科医院 様		TEL: 086-956-0505
所在地	岡山県赤磐市桜が丘西4-1-11		院長 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社		神田 様
納入年月日	平成28年10月24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 508
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 219	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 61	殺菌/消毒+7L: 1724
	リークチェック: 0	自己洗浄: 702	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2019 年 10 月 23 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	上野 芳樹  印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	