

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

11-09433

No. 190924

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	みつおかクリニック 様		機番	301119
環営	所在地	岡山県倉敷市玉島中央町2丁目435番8		納入日	2017年07月04日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2019年07月22日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	2019年09月24日
計	3				

修理依頼・不具合内容

消毒時給水異常（E:202） 頻発

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

条件を振って運転確認しましたが、異常は再現しませんでした。

給水異常が発生する要因は下記が考えられますが、代替機が問題無く動いていることから「1」を省きました。「2」は運転回数から判断して性能劣化は考え難く「3」と「4」について部品交換を行いました。

- 1：客先の給水量が少ない、圧力が規定（0.1～0.8 MPa）から外れている
- 2：給水電磁弁の故障または性能低下
- 3：排水栓の動作不良による水の流失
- 4：水槽の水を検知するセンサー系統の不具合

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：649 殺菌：2559、殺菌＋アルコール：1257、リークチェック：1233
自己洗浄：562、アルコール単独：0、エア単独：1

承認
若 19.9.24 井
審査
中 19.9.24 澤
作成
R01.9.24 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	コントロール基板	1枚	
2	排水栓	1個	
3	水位センサー（LVH）	1個	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528