

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年3月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300512
作業年月日	令和2年3月12日		作業時間：60分
顧客名	のむら内科循環器消化器クリニック		TEL：087-816-8088
所在地	香川県高松市香川町川東上字漆原1802-7		院長 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社		松原 様
納入年月日	平成27年3月6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 5回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 729
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数：200	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：10	殺菌/消毒+7L：1126
	リークチェック：0	自己洗浄：731	7L単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水フィルタ		☒	1

お客様ご確認署名欄	香川県高松市香川町川東上字漆原1802番地 日	
	医療法人社団 のむら内科循環器消化器クリニック	
	理事長 野村 昌弘 印	

修理業者	新鋭工業 株式会社 岡山支店	責任技術者	作業者
	岡山県岡山市北区中島田町1-7-8		
	TEL：086-235-0323		

