

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2019年10月8日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500022
作業年月日	2019年10月8日		作業時間	1.5 Hr
顧客名	大谷病院 様		TEL	0868-22-9381
所在地	岡山県津山市田町33番地		ご担当	事務長 様
販売店	株式会社津山医研		ご担当	山形専務 様
納入年月日	2018 年 10 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 排水フィルター	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 936
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0301 / T10A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 170 更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒 (総運転回数)： 92 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 4 (5分)
	消毒+アル (総運転回数)： 79	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 67 (5分)
	リークチェック： 0	自己洗浄： 32
	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2019 年 10 月 8 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	医療法人晴雲会大谷病院
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	