

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200618

発行日:

2020 年 6 月 18 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号	301046	
	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業年月日	2020 年 6 月 18 日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間	Hr	
顧客名	岡山第一病院 様				TEL:	086-272-4088	
所在地	岡山県岡山市中区高屋343				ご担当	様	
販売店					ご担当	様	
納入年月日	2017 年 1 月 6 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐				付属品		
作業区分 出張・引取	保守点検	☐	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入	☐
	修理	☒	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/18 起動時給水異常 (E201)

令和2年定期保守点検 : レベルセンサ異常 (E214)

不具合原因、作業内容

コントロール基板の故障で水位レベルセンサの信号を受け付け
ませんでした。これを交換して復旧しました。

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒ スコグモロの送気確認
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 970
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0209 / ToSC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

交換した基板に故障が追加されています。通常時確認していますので
気になる場合はご連絡をお願いします。

装置 情報	交換後運転回数： 3		更新（リセット）実施・未実施		殺菌/消毒： 40 /	殺菌/消毒+7H： 172 /
	リークチェック： 0		自己洗浄： 155		7H-1単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
エアフィルタ	☐
水フィルタ	☐
コントロール基板	☒ 1
	☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

小銭印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
R02.6.18 中沢	中澤 寛宗