

保守点検・修理 報告書

発行日：令和元年11月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300649
作業年月日	令和元年11月28日	作業時間：60分
顧客名	ファミリークリニック四万十 様	TEL：0880-22-1295
所在地	高知県高岡郡四万十町北琴平2-37	院長 様
販売店	株式会社末徳屋医療器店	松元 様
納入年月日	平成27年11月12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 756
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数：160	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒：24	殺菌/消毒+7L：627
	リークチェック：0	自己洗浄：188	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水フィルター		☐	1

お客様ご確認署名欄	高知県高岡郡四万十町北琴平2-37日 ファミリークリニック四万十 溝 潤 和 久
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者