

# 保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年11月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号：300649
作業年月日	令和2年11月12日	作業時間：60分
顧客名	ファミリークリニック四万十 様	TEL：0880-22-1295
所在地	高知県高岡郡四万十町北琴平2-37	院長 様
販売店	株式会社末徳屋医療器店	濱田 様
納入年月日	平成27年11月12日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7年7回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
<b>定期保守点検実施</b>	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 512
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数： 124	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒： 27	殺菌/消毒+7L： 748
	リークチェック： 0	自己洗浄： 709	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	1
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input type="checkbox"/>	1
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input type="checkbox"/>	1
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1	新マニホールドチューブ一式		<input type="checkbox"/>	1
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1	新型排水フィルタ		<input type="checkbox"/>	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

高知県高岡郡四万十町北琴平町2-37  
**ファミリークリニック四万十**  
**溝 淵 和 久** 印

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
 TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	