

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 3月 24日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus			製造番号：	500258
作業年月日	令和2年 3月24日			作業時間：	60 Hr
顧客名	みずた内科			TEL：	0875-83-7218
所在地	香川県三豊市詫間町松崎301-3			院長	様
販売店	株式会社アステイス			北尾	様
納入年月日	2019年3月25日			保証期間 内	外 ☒
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張 引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 969
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0303 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報

装置 情報	交換後運転回数： 341 更新 (リセト) 実施 ・ 未実施		消毒 (総運転回数)： 107 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 102	
	消毒+アル (総運転回数)： 236		消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 235	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 216	7Lボトル単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 57811028			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルター	☒	排水フィルター	☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

令和2年 3月 24日

医療法人社団みずた内科

ご署名 水田 潤 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

(水田)

(潤)