

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：300738
作業年月日	令和2年12月9日			作業時間：60分
顧客名	小野医院 様			TEL：0877-62-0118
所在地	香川県三豊市詫間町詫間6815-5			院長
販売店	富士フイルムメディカル株式会社			松原 様
納入年月日	平成27年12月24日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	4年 4回目
☒ 出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐
	その他		☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルズ数 520
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 ☒完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 224	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 4	殺菌/消毒+7L: 1486
	リークチェック： 1	自己洗浄： 1/3	7L単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バッド分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
バッド水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
バッド水濃度計用ケーブル		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水ケーブル		☐	1

お客様ご確認署名欄

※ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R2年 12月 9日
小野好彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

倉

川