

販 売 名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐		製造番号：100162
作業年月日	令和3年3月10日		作業時間：1時間
顧 客 名	井戸内科クリニック 様		TEL：0868-22-2101
所 在 地	岡山県津山市山下101番地		院長 様
販 売 店	株式会社津山医研		田口 様
納入年月日	平成23年1月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 10年 10回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合原因、作業内容

フタロック	正常	☑	殺菌槽 LED	正常	☑
酸素ライン	正常	☑	エアライン	正常	☑
アルコールライン	正常	☑	オゾン水濃度計動作	正常	☑ バルブ数 643
オゾンセンサ	正常	☑	排水栓、排水ライン	正常	☑
給水ライン	正常	☑	細管送水ライン	正常	☑
濃度計流量	正常	☑	排気ライン	正常	☑
水位センサー	正常	☑	オゾン濃度	正常	☑ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☑	異常音、振動	正常	☑
清掃	正常	☑	電源コード	正常	☑ 清掃 ☑
トレー	正常	☑	殺菌チューブ類	正常	☑
殺菌槽コネクタ	正常	☑	マニホールド周辺チューブ	正常	☑
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1122	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒: 6296	殺菌/消毒+アル: 5809
	リークチェック: 2325	自己洗浄: 2872	アルコール単独: 25	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量		交換部品名称	部品コード	交換	数量
バラン分解触媒		☒	1		吸盤		☒	1
排水栓		☒	1		接続コネクタ；水槽側		☒	2
バラン水濃度計		☒	1		接続コネクタ；チューブ側		☒	2
バラン水濃度計用フィルタ		☒	1				☐	
オゾンセンサー		☒	1				☐	

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報とは、他の目的では使用いたしません。

井戸内科クリニック

ご署名

井戸清仁印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者

作業者



井上