

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

令和3年3月24日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |       |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                                   |                                                                       | 製造番号： | 500494       |
| 作業年月日 | 令和3年3月24日                                                                                                                     |                                                                       | 作業時間： | 60 Hr        |
| 顧客名   | 佐藤医院 様                                                                                                                        |                                                                       | TEL：  | 0877-46-3387 |
| 所在地   | 香川県坂出市駒止町2-1-38                                                                                                               |                                                                       | 院長    | 様            |
| 販売店   | 株式会社メディカルサービス 様                                                                                                               |                                                                       | 合田    | 様            |
| 納入年月日 | 2020年3月26日                                                                                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品   |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |       |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |       |              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

## 定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |    |                                                                            |              |    |                                                      |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 943         |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm      |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水槽側コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                                   | 運転プログラムバージョン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0303 / T12A |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                                 |                                |            |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 92 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 消毒 (総運転回数)： 5 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 3 |            |
|          | 消毒+アル (総運転回数)： 87               | / 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 87           |            |
|          | リークチェック： 1                      | 自己洗浄： 1                        | アルコール単独： 0 |

| 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 交換・数量                               | 交換部品名称        | 交換・数量                               |
|---------|-------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| オゾン水濃度計 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒      | <input checked="" type="checkbox"/> | 吸盤            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交換後 No. |                                     |    | 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> | エアフィルター       | <input type="checkbox"/>            |
| オゾンセンサー | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 | <input type="checkbox"/>            | 水フィルター        | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 給水フィルター       | <input type="checkbox"/>            |
|         |                                     |    |              | <input type="checkbox"/>            | 排水フィルター-E-202 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

坂出市駒止町二丁目1番38号  
医療法人社団 佐藤医院

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

