

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 7月 14日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500339
作業年月日	令和2年 7月14日		作業時間：	60 Hr
顧客名	ありとも内科クリニック 様		TEL：	087-887-4103
所在地	香川県高松市小村町256-13		院長	様
販売店	中澤氏家薬業株式会社		井下	様
納入年月日	2019年7月23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 782
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0203 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 1214 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒(総運転回数)： 528 / 消毒(洗剤洗浄あり)： 128	
	消毒+アル(総運転回数)： 688	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり)： 676	
	リークチェック： 1151	自己洗浄： 80	7%アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 12040978			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	排水フィルター	☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 14 日

ご署名 ありとも内科クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者