

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

令和3年4月7日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500497
作業年月日	令和3年4月7日		作業時間：	60 Hr
顧客名	あさひクリニック 様		TEL：	087-831-0280
所在地	香川県高松市観光町538-2		院長	様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社 様		堤	様
納入年月日	2020年3月31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 1112
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 96 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数)： 98 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 95	
	消毒+アル (総運転回数)： 0 / 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 0		
	リークチェック： 0	自己洗浄： 37	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ、チューブ側	☐	水フィルター	☒
☐			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	給水フィルター	☐
			☐		排水フィルター-E-202	☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 鶴見 大樹	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	