

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号：301278
作業年月日	令和2年10月7日			作業時間：60分
顧客名	三宅病院 様			TEL：0877-32-2447
所在地	香川県仲多度郡多度津町米町2-1-36			院長
販売店	株式会社メディカルサービス			松下 様
納入年月日	平成29年10月24日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □	3年 ☒ 3回目	定期点検シール記入 □	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロツク	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライオン	正常	エアライオン	正常
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライオン	正常
給水ライオン	正常	細管送水ライオン	正常
濃度計流量	正常	排気ライオン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常	マニホールド周辺チューブ	正常

作業結果 ☒完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：479	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：366	殺菌/消毒+バルブ：278
	リークチェック：0	自己洗浄：152	バルブ単独：2	エア単独：77

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バルブ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
バルブ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
バルブ水濃度計用バルブ		☒	1	新マニホールドチューブ一式		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	新型排水バルブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

※内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

※本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年10月7日
香川県仲多度郡多度津町米町2丁目1番36号
多度津三宅病院

ご署名 TEL 0877-32-6161 FAX 0877-32-6161

印

責任技術者

作業者

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

