

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 7 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500339
作業年月日	2021 年 7 月 19 日		作業時間: / Hr
顧客名	ありとも内科クリニック 様		TEL: 087-887-4103
所在地	香川県高松市小村町256-13		ご担当 様
販売店	中澤氏家業株式会社		ご担当 井下 様
納入年月日	2019 年 7 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 808
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.17 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1289 更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 930 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 135 (1/3)
	消毒+アル (総運転回数): 1575	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 1557 (1/3) / 3 (5/3)
	リークチェック: 2396	自己洗浄: 130
	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	年 月 日 ご署名 ありとも内科クリニック 印
--	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	