

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2021年 11 月 29 日

|       |                                                                                                                             |                                                            |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                            | 製造番号：301012      |
| 作業年月日 | 2021年11月29日                                                                                                                 |                                                            | 作業時間：            |
| 顧客名   | 勝北すこやかクリニック 様                                                                                                               |                                                            | TEL：0868-29-7701 |
| 所在地   | 岡山県津山市坂上221-1                                                                                                               |                                                            |                  |
| 販売店   | 株式会社津山エムアイ                                                                                                                  |                                                            | 國米 様             |
| 納入年月日 | 2016年11月14日                                                                                                                 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 5年 5回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                            |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/1. オゾン水生成濃度 E110 x 1. 7/16. 停電 E403. 8/28. 酸素圧力異常 E200 x 1

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 738    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 左上コンに小さなひび割れ                           | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |             |                                                     |           |               |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：456 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒：806 | 殺菌/消毒+アル：1297 |
|      | リークチェック：4   | 自己洗浄：1033                                           | アルコール単独：2 | エア単独：2        |

| 交換部品名称       | 部品コード      | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|------------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      | 11100784   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |            | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      | 140627-006 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 11 月 29 日

ご署名 太田 明美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

| 責任技術者 | 作業者           |
|-------|---------------|
| 大倉    | 2021.11.29 早坂 |