

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20201012
発行日: 2020 年 10 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300513
作業年月日	令和 2 年 9 月 8 日		作業時間:	Hr
顧客名	石川ヘルスクリニック 様		TEL:	0880-22-0002
所在地	高知県高岡郡四万十町榊山町7-23		ご担当	様
販売店	株式会社末徳屋医療器店 様		ご担当	様
納入年月日	2015 年 3 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ (異常原因の調査)			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8月からオゾン水生成注意(E:110)、オゾン水生成異常(E:207)が頻発している
9/1 8:54 オゾン水生成注意(E:110) (9:11の運転は正常に終了した)
9/2 8:00 オゾン水生成注意(E:110)

不具合原因、作業内容

9/8訪問した時は4回運転して異常はでませんでした。水温を測ったところ11:32分で水温27度(推奨は25℃)でした。このことから機械の故障ではなく夏場の水温がオゾン水生成を妨げたと推察します。
酸素流量を調整してオゾン生成量を増やしましたので、様子を見てくださいますようお願い致します。

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐	
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐	
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐	パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐	
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐	
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐	
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐	履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐	
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐	
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐	
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐	
	☐		☐	

作業結果、連絡事項、特記事項

報告書の作成が遅れて申し訳ありませんでした。

11月に保守点検(有償)の時期が来ます。性能維持のため受けてくださいますようお願い申し上げます。

装置 情報	交換後運転回数：208	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：657	殺菌/消毒＋7ℓ：1403
	リークチェック：1068	自己洗浄：1070	アルコール単独：4	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者

