

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年6月17日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500322
作業年月日	令和3年6月17日		作業時間：	60 Hr
顧客名	水谷内科クリニック 様		TEL：	087-835-5037
所在地	香川県高松市木太町3602-1		院長	様
販売店	尾路医科器械株式会社 様		亀井	様
納入年月日	2019年6月17日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 945
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 101 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数)： 130 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 1(1分)/42(5分)/32(10分)	
	消毒+アル (総運転回数)： 6	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 2(5分) / 4(10分)	
	リークチェック： 2	自己洗浄： 114	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 18023082			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	給水フィルター	☐
				☐	排水フィルター-E-202	☐

お客様ご確認署名欄	23 年 5 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	竹下 知里 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	