

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和3年7月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300278
作業年月日	令和3年7月15日	作業時間：1
顧客名	岡本医院 様	TEL：0790-88-0605
所在地	兵庫県佐用郡佐用町家内42	院長 様
販売店	めいほうメディカル株式会社	田中 様
納入年月日	平成26年8月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7年 7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/9, E209, 1 原水異常

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 677
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：373	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1338	殺菌/消毒+アル：1310
	リークチェック：3	自己洗浄：1154	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計	18083228	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☒	1
オゾンセンサー	200516-001	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 7 月 15 日

岡本泰子

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	2023.7.15

Ver.3.1