

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和3年8月10日

|       |                                                                                                                             |                                                                       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                                       | 製造番号：301120      |
| 作業年月日 | 令和3年8月10日                                                                                                                   |                                                                       | 作業時間：1時間         |
| 顧客名   | 安藤医院 様                                                                                                                      |                                                                       | TEL：0877-62-0129 |
| 所在地   | 香川県善通寺市上吉田町2-4-11                                                                                                           |                                                                       | 院長 様             |
| 販売店   | 富士フイルムメディカル株式会社                                                                                                             |                                                                       | 堤 様              |
| 納入年月日 | 平成29年8月2日                                                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4年 4回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

長期使用されない場合は、主電源をお切り下さい。

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 6/5    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 2.67 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |            |         |                     |            |              |
|----------|------------|---------|---------------------|------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 2 |         | 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 殺菌/消毒： 7   | 殺菌/消毒+7L： 23 |
|          | リークチェック： 0 | 自己洗浄： 1 |                     | アルコール単独： 1 | エア単独： 0      |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3年 8月 10日

香川県善通寺市上吉田町2丁目4-11

医療法人社団 安藤医院

ご署名

医師 安藤 道明



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
| 大倉    | 井上  |