

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 9 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500577
作業年月日	2021 年 9 月 24 日		作業時間: / Hr
顧客名	医療法人萌生会 国定病院 様		TEL: 0865-64-3213
所在地	岡山県浅口郡里庄町大字浜中93-141		ご担当 様
販売店	五洋医療器株式会社		ご担当 繁森 様
納入年月日	2020 年 9 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
1/5. 停電 E403 x 1 7/10. 酸素圧力異常 2. E200 x 1			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 865
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1080 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 478 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5/478
	消毒+アル (総運転回数): 603	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 5/603
	リークチェック: 0	自己洗浄: 291
	アルコール単独: 3	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 17122848			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
141201-010			オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 24 日
ご署名 寺岡 純 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	2021.9/24 寺岡