

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 211014

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 岡山支店 殿		機種	OED-1000S Plus
環営	環品	顧客名	岡外科胃腸肛門科 様		機番	500639
		所在地	岡山県津山市河辺 943-1		納入日	2021年02月04日
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年09月24日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年10月18日

修理依頼・不具合内容

水槽から水が漏れる。
(新鋭工業殿が現地にて漏水箇所を特定済み)

不具合原因（故障箇所）と処置

この度は不具合を起こしてしまい大変申し訳ございませんでした。下記の通りご報告いたします。

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽のN-1部分から水が漏れることを確認しました。（写真の黄色いテープ部分）
継手の組付けまたはネジの加工不良と考えます。水槽を交換して復旧いたしました。

写真：水槽全景



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・・・正常
- 出荷時の装置情報
消毒：77/66、消毒＋アルコール：179/178、リークチェック：1
自己洗浄：5、アルコール単独：3、エア単独：7

交換部品

承認
松 21.10.14 永
責任技術者
中 21.10.14 澤
作成
R03. 10. 14 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
1	水槽 ASSY	1 式	