

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140327

発行日 平成 26年 3月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300177	
作業年月日	平成26年 3月 27日		作業時間:	1.0	Hr
顧客名	西高松脳外科・内科クリニック 様		TEL:	087-832-8811	
所在地	香川県高松市郷東町134-1		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 25年12月19日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/14, 3/24 排水注意 (E111)

不具合原因、作業内容

排水フィルタが詰まって排水時間が規定より長くなっていました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残 12MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 未実施	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 562
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ コネクタは塞いでフィルタ		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

6~7月頃 様子を見て見に行きます。

装置情報	交換後運転回数: 25	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 5	消毒+アル: 22
	リークチェック: 3	自己洗浄: 19	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
排水フィルタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

藤本印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

H.26.3.27

H26.3.27

中沢

中沢