

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年1月10日

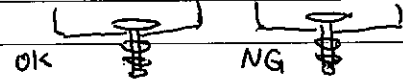
販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100073
作業年月日	平成26年1月10日		作業時間:	Hr
顧客名	青山医院		TEL:	0868-74-2005
所在地	岡山県美作市 橋本549		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成22年6月8日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/10 殺菌時 排水異常 4回発生

発生日: 1/6 x 1 1/27 x 1 1/24 x 1 1/21 x 1 1/19 x 1 1/18 x 1 1/16 x 1 1/14 x 1

不具合原因、作業内容

排水栓の位置が若干開き気味で、そのスキマから水槽の水が流失し、
水槽に水が満水になりませんでした。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 470
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 675 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

排水栓の位置を調整して復旧しました。

装置 情報	交換後運転回数: 66		更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 158	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 151		アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26年 1 月 10 日

ご署名 青山重男 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
H26.1.10 中沢	H26.1.10 中沢