

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2021年11月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100449
作業年月日	2021年11月8日		作業時間：
顧客名	守安外科胃腸科整形外科クリニック 様		TEL：086-422-2511
所在地	岡山県倉敷市宮前380-60		
販売店	めいほうメディカル株式会社		守屋 様
納入年月日	2012年8月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 9年 9回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

停電 E403 x2

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 661
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 取付部にて	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：209	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：91	殺菌/消毒+7L：2322
	リークチェック：1	自己洗浄：2276	アルコール単独：3	エア単独：4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計	13091528	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー	160901-001	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 3 年 11 月 8 日

ご署名

宅見

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者



作業者

2021. 11/8

