

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 11 月 18 日

|       |                                                                                                                               |                                                            |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                                   |                                                            | 製造番号: 500352      |
| 作業年月日 | 2021 年 11 月 18 日                                                                                                              |                                                            | 作業時間: / Hr        |
| 顧客名   | 間阪内科                                                                                                                          | 様                                                          | TEL: 0869-52-1717 |
| 所在地   | 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸185-2                                                                                                            |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社エバルス                                                                                                                      |                                                            | ご担当 水野 様          |
| 納入年月日 | 2019 年 8 月 20 日                                                                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                            |                   |

|                             |                                                                               |              |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴             |                                                                               |              |                                                       |
| 消毒時給水異常 E202x3, 排水異常 E402x2 |                                                                               |              |                                                       |
| 不具合原因、作業内容                  |                                                                               |              |                                                       |
| 点検項目                        |                                                                               |              |                                                       |
| フタロック                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| アルコールライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 1062      |
| オゾンセンサ                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm    |
| 水漏れ確認                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレー                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水槽側コネクタ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
|                             | <input type="checkbox"/>                                                      | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0304/T12A |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項   |                                                                               |              |                                                       |

|          |                               |                                     |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 177 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒 (総運転回数): 357 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 55x1 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 2              | / 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0                 |
|          | リークチェック: /                    | 自己洗浄: 0 7%アルコール単独: 0 エア単独: 0        |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換・数量                                 | 交換部品名称  | 交換・数量                                 |
|------------------|-------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| 交換後 No. 20023914 |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | エアフィルター | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| 191015-006       |                                     |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |         | <input type="checkbox"/>              |
|                  | <input type="checkbox"/>            |    |               | <input type="checkbox"/>              |         | <input type="checkbox"/>              |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 2021 年 11 月 18 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |                  |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |                  |
| ご署名 岡田 印                          |                  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL: 086-235-0323

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 大倉    | 早坂  |