

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 1 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                                   |                                                                       | 製造番号： 500353      |
| 作業年月日 | 2021 年 12 月 1 日                                                                                                               |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | ふじもり内科・消化器科クリニック 様                                                                                                            |                                                                       | TEL： 087-813-6114 |
| 所在地   | 香川県高松市多肥下町482                                                                                                                 |                                                                       | ご担当 院長 様          |
| 販売店   | 中澤氏家業株式会社 香川本社                                                                                                                |                                                                       | ご担当 小山 様          |
| 納入年月日 | 2019 年 9 月 24 日                                                                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2 年 2 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                   |

|                            |                                                                               |              |                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                               |              |                                                         |
| E109 x3 E202 x1            |                                                                               |              |                                                         |
| E200 x4                    |                                                                               |              |                                                         |
| E 110 x1                   |                                                                               |              |                                                         |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                               |              |                                                         |
|                            |                                                                               |              |                                                         |
| 点検項目                       |                                                                               |              |                                                         |
| フタロック                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 1155        |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサー                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm      |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレー                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水槽側コネクタ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|                            | <input type="checkbox"/>                                                      | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0304 / 1214 |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                         |
|                            |                                                                               |              |                                                         |

|          |                                |         |                                         |         |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 2022 更新 (リセット) 実施・未実施 |         | 消毒 (総運転回数)： 1437 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 56 1431 |         |
|          | 消毒+アル (総運転回数)： 1611            |         | 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 55 1608                 |         |
|          | リークチェック： 6                     | 自己洗浄： 4 | アルコール単独： 14                             | エア単独： 7 |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 交換・数量                               | 交換部品名称  | 交換・数量                               |
|------------------|-------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒      | <input checked="" type="checkbox"/> | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 交換後 No. 19023504 |                                     |    | 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> | エアフィルター | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 180626-007       |                                     |    | オゾン水濃度計用フィルタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 給水パイプ   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                  | <input type="checkbox"/>            |    |              | <input type="checkbox"/>            |         | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>お客様ご確認署名欄</p> <p>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</p> <p>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</p> | <p>2021 年 12 月 1 日</p> <p>ご署名 藤 茂 農 印</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |