

尾辻ケイイチ 御中



点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者: 北村

点検年月日	H21年 1月 27日	機種名	ONW-10	製造機番	960
設置場所				TEL	
納入時期	18年 5月	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
<b>スイッチ類</b>				
電源錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
<b>ランプ類</b>				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
<b>洗浄動作</b>				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアバージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
<b>性能確認</b>				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 91.7%	流量: 0.77 L/min 圧力: 1.30 ~ 2.3 / MPa
<b>水漏れ確認</b>				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
<b>清掃</b>				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸塵筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H21年 1月 27日

北村 圭 (印)

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ  
環境事業部

日付: H26.1.27 作業者 新鏡 北村  
ONW-10機番: 960 PSA機番: SPS-1025 客先: 尾上クリニック 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- )	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) ( <u>91.7</u> %)	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) ( <u>0.77</u> L/min)	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
PSA圧力の確認 ( <u>1.30</u> Mpa) ~ ( <u>2.3</u> Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
ドレンチューブは接続したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否
インジケータの変色は良好か	合/否 <input checked="" type="checkbox"/> /否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)