

古閑医院

御中

点検確認書

株式会社 IHシパウラ
環境事業部

点検担当者：井、白石

点検年月日	21年 7月 29日	機種名	ONW-10	製造機番	189
設置場所				TEL	
納入時期	H15年 10月	日	使用回数	562	御対応者

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☐	調整	☒
異常音、振動	正常	☐	調整	☒
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	94.7	
酸素発生	正常	☒	濃度：0.4%	流量：0.8 L/min 圧力：1.25 ~ 2.25 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	H21.7.29 定期メンテナンス実施。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21年 7月 29日
ご署名 古閑 宏

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2017. 7. 29

作業者 井

白石

ONW-10機番: 189

PSA機番: SPS-

客先: 石川 医院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10293)	(合) / 否	
ドレン用フィルターを交換したか	(合) / 否	
排水シリコンチューブを交換したか	合 / (否)	
オゾン分解触媒を交換したか	(合) / 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合) / 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	(合) / 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	(合) / 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(94.7 %)	(合) / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.8 L/min)	(合) / 否
PSA圧力の確認 (1.25 Mpa) ~ (2.25 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	(合) / 否	
フロントパネルのランプは配線したか	(合) / 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合) / 否	
ドレンチューブは接続したか	(合) / 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	(合) / 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合) / 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	(合) / 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合) / 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	(合) / 否	
別紙 点検確認書に記録したか	(合) / 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合 / 否	
運転は正常か、エラーはでないか	合 / 否	
インジケータの変色は良好か	合 / 否	

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)