

星和会 フリニック

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 井 淳一郎

点検年月日	21年 9月 16日	機種名	ONW-10	製造機番	798
設置場所				TEL	
納入時期	H17年 3月 日	使用回数	7,278	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☐	調整	☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：95%	流量：0.82 L/min 圧力：1.02 ~ 1.85 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☒

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	一式	定期メンテナンス実施。 左記パーツ交換済。 その他異常なし。
吸湿筒	交換	☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☒	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	
下部フィルター	交換	☒	一個	

21年 9月 16日

ご署名

井 淳一郎 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシパウラ
環境事業部

日付: 11.9.16

作業者 中澤一郎

ONW-10機番: 298

PSA機番: SPS-10083

客先: 星和会クリニック

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10083)	☒ 合	☐ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合	☐ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合	☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合	☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合	☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合	☐ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	☒ 合	☐ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(85 %)	☒ 合
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.82 L/min)	☒ 合
PSA圧力の確認	(102 Mpa) ~ (185 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合	☐ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合	☐ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合	☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合	☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合	☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合	☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合	☐ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合	☐ 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合	☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合	☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合	☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

2.278