

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：井 淳一郎

点検年月日	H21年 2月 17日	機種名	ONW-10	製造機番	761
設置場所				TEL	
納入時期	H17年 7月 日	使用回数	4,377	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：94% 流量：0.78 L/min 圧力：1.30 ~ 2.24 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	2/17定期メンテナンス実施 ドレンフィルター、オゾン分解触媒交換。 その他点検異常なし 次回 H22年2月頃点検予定。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
21年2月17日 ご署名 石田 康彦			

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: H21. 2. 17

作業者 井 澤 一郎

ONW-10機番: 761

PSA機番: SPS- 0802

客先: ながて大腸月門クリニック 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否 ☒
ドレン用フィルターを交換したか	合/否 ☒
排水シリコンチューブを交換したか	合/否 ☒
オゾン分解触媒を交換したか	合/否 ☒
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否 ☒
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否 ☒
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否 ☒
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94 %)	合/否 ☒
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.78 L/min)	合/否 ☒
PSA圧力の確認 (130 Mpa) ~ (224 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否 ☒
フロントパネルのランプは配線したか	合/否 ☒
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否 ☒
ドレンチューブは接続したか	合/否 ☒
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否 ☒
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否 ☒
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否 ☒
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否 ☒
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否 ☒
別紙 点検確認書に記録したか	合/否 ☒
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否 ☒
運転は正常か、エラーはでないか	合/否 ☒
インジケータの変色は良好か	合/否 ☒

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)