

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：河野 敏武

点検年月日	21年 9月 9日	機種名	ONW-10	製造機番	675
設置場所	永友胃腸科内科			TEL	
納入時期	H16年 7月 28日	使用回数	120	御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.3 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒					
酸素発生	正常	☒	濃度：	93 %	流量：	0.82 L/min	
			圧力：	12.7 ~ 21.7 MPa			
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☐			
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	異常なし。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

21年 9月 9日

ご署名

永友 敏武

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 21年9月9日

作業者 河野 敏武

ONW-10機番: 675

PSA機番: SPS-

客先: 永友園腸科内科

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (93 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.82 L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (1.27 Mpa) ~ (2.17 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)