

やさきクリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 北村

点検年月日	H21年 7月 10日	機種名	ONW-10	製造機番	465
設置場所				TEL	
納入時期	H18年 2月	使用回数	221	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.3 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.5%	流量: 0.8 L/min 圧力: 1.32 ~ 2.40 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	H21.7.10 定期メンテナンス実施 オゾン分解触媒、ドレンフィルタ交換。 その他点検異常なし。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21年 7月 10日
ご署名 北村

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ
環境事業部

日付: 1721 7-10

作業者 北村

ONW-10機番: 965

PSA機番: SPS- 0145

客先: やまさきクリニック

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合 (否)
ドレン用フィルターを交換したか		合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか		合 (否)
オゾン分解触媒を交換したか		合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合 / 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)		合 / 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (93.5 %)		合 / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)		合 / 否
PSA圧力の確認 (1.2 Mpa) ~ (240 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか		合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合 / 否
ドレンチューブは接続したか		合 / 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合 / 否
別紙 点検確認書に記録したか		合 / 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合 / 否
運転は正常か、エラーはでないか		合 / 否
インジケータの変色は良好か		合 / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)