

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者: 比村

点検年月日	H21年 8月 21日	機種名	ONW-10	製造機番	1043
設置場所		TEL			
納入時期	H18年 2月 日	使用回数	661	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
ランプ類						
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
洗浄動作						
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
性能確認						
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.3	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 94.5%	流量: 0.8/ L/min	圧力: 1.00 ~ 2.29	MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
清掃						
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>		
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>		
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	H21.8.12 定期メンテナンス実施 ホジ分解触媒、ドレンフィルター交換 その他点検異常なし。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21年8月12日
ご署名 徳原光洋

※: 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ
環境事業部

日付: 12/8/12

作業者 比木

ONW-10機番: 1043

PSA機番: SPS-0119

客先: 徳原クリーン

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧カスイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.5 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.81 L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (1.33 Mpa) ~ (2.29 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		