

東都病院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 河野 敏武

点検年月日	21年 9月 10日	機種名	ONW-10	製造機番	988
設置場所				TEL	
納入時期	H18年 3月 末日	使用回数	1202	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 : 90 %	流量 :	0.8 L/min 圧力 : 130 ~ 235 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

21年 9月10日

ご署名 香山 恵子 (印)

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ
環境事業部

日付: H.21年9月10日

作業者 河野 敏哉

ONW-10機番: 988

PSA機番: SPS-

客先: 東郷町立病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否 ☒ 否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否 ☒ 否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否 ☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否 ☒ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否 ☒ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否 ☒ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否 ☒ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(<u>90</u> %)	合/否 ☒ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(<u>0.8</u> L/min)	合/否 ☒ 否
PSA圧力の確認	(<u>130</u> Mpa) ~ (<u>235</u> Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否 ☒ 否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否 ☒ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否 ☒ 否
ドレンチューブは接続したか		合/否 ☒ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否 ☒ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ パッキンが <u>無い</u>	合/否 ☒ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否 ☒ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否 ☒ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否 ☒ 否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否 ☒ 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否 ☒ 否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否 ☒ 否
インジケータの変色は良好か		合/否 ☒ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

3274673