

別府中央病院

御中

点検確認書

株式会社 HIシパウラ
環境事業部

点検担当者：北村

点検年月日	H21年3月6日	機種名	ONW-10	製造機番	1312
設置場所				TEL	
納入時期	H19年9月28日	使用回数	677	御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.3 mg/L				
オゾンインジケータ	正常	☒					
酸素発生	正常	☒	濃度：94.6% 流量：0.75 L/min 圧力：1.29~2.18 MPa				
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☐			
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☒	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

21年3月6日

ご署名 市平貴美



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ
環境事業部

日付: 142/3.6

作業者 新鋭 北村

ONW-10機番: 1312

PSA機番: SPS-1353

客先: 別府中央病院

様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.6 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (1.29 Mpa) ~ (2.18 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)