

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 井 淳一郎

点検年月日	H21年 1月 16日	機種名	ONW-10	製造機番	1081
設置場所		TEL		0944-43607	
納入時期	H18年 7月 日	使用回数	1,405	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源鈕	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット鈕	正常	☒	交換	☐
運転/停止鈕	正常	☒	交換	☐
アルコールモード鈕	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水温度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 91 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 130 ~ 230 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	1/16 定期メンテナンス交換済。 装置内点検異常なし。 次回定期点検 H22年1月予定
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21年 1月 16日
医療法人 吉岡クリニック
理事長 吉岡 仙一

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: H21.1.16 作業者 井 高 幸 郎
ONW-10機番: 1081 PSA機番: SPS-0819 客先: 高岡フリース 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (91 %)	合/否	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.78 L/min)	合/否	合/否
PSA圧力の確認 (130 Mpa) ~ (230 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否	合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否	合/否
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		