

江崎医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 道山敏彦

点検年月日	20年 12月 15日	機種名	ONW-10	製造番号	847
設置場所		使用回数	129	TEL	
納入時期	17年 10月 20日	御対応者			

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源切	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット切	正常	☒	交換	☐		
運転/停止切	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード切	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度: 94% 流量: 0.82 L/min 圧力: 1.0 ~ 2.0 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	コスト 酸素濃度、流量、 インジケータ、 異常の対応。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日
宮崎県延岡市無鹿町1丁目710番地
江崎医院
院長 江崎 豊

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 20.12.15 作業者 道山 敏彦
ONW-10機番: 847 PSA機番: SPS- 客先: 江崎産業 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.0 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.82 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (1.18 Mpa) ~ (2.10 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)	