

長倉医院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 道山 敏彦

点検年月日	20年 11月 19日	機種名	ONW-10	製造機番	444
設置場所				TEL	
納入時期	4.17年 6月 日	使用回数	609	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92%	流量: 0.02 L/min 圧力: 1.00 ~ 2.5 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント カン液後、酸素発生が、 異常あり。各点検済み。
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸着筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

20 年 11 月 19 日

ご署名 和田 順子 

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2011.11.19 作業者 道山 敏彦
ONW-10機番: 448 PSA機番: SPS- 客先: 長倉医院 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	☒ 合
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	☒ 合
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	☒ 合
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	☒ 合
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	☒ 合
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	☒ 合
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	☒ 合
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (<u>93.1</u> %)	合/否	☒ 合
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (<u>0.82</u> L/min)	合/否	☒ 合
PSA圧力の確認 (<u>1.33</u> Mpa) ~ (<u>2.32</u> Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	☒ 合
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	☒ 合
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	☒ 合
ドレンチューブは接続したか	合/否	☒ 合
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	☒ 合
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	☒ 合
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	☒ 合
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	☒ 合
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	☒ 合
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	☒ 合
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	☒ 合
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	☒ 合
インジケータの変色は良好か	合/否	☒ 合

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)