

⑥

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検年月日	H20年 12月 22日	機種名	ONW-10	製造機番	1050
設置場所				TEL	
納入時期	H18年 2月	使用回数	985	御対応者	杉田俊彦様

点検項目		点検結果	
スイッチ類			
電源釦	正常 ☒	交換 ☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐	
ランプ類			
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐	
洗浄動作			
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
性能確認			
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☐		
酸素発生	正常 ☐	濃度: 92% 流量: 0.8 L/min 圧力: 1.23 ~ 2.15 MPa	
水漏れ確認			
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃			
外装	正常 ☐	清掃 ☒	
内部	正常 ☐	清掃 ☒	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	1回目定期メンテナンス実施済。 ドレンスロット、オイル触媒交換。 54代点検異常なし。 次回H21年12月頃予定。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

20年12月22日

ご署名 村田 大紅 ㊞

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HIIシパウラ
環境事業部

日付: H20.12.22

作業者: 井

武田

ONW-10機番: 1050

PSA機番: SPS-0801

客先: さくら病院

様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ポートの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (92 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (1.23 Mpa) ~ (2.15 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)