

藤見 昌陽 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 道山 敏彦

点検年月日	H24年 1月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	707
設置場所				TEL	
納入時期	H16年 9月	使用回数	283	御対応者	

点検項目			点検結果		
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 8.0% 流量: 0.8 L/min 圧力: 1.16 ~ 2.03 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☐	清掃	☒	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	オゾン濃度、流量、 インジケータ 異常ありをせん。
吸着筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H24年 1月 20日

署名 藤見 昌



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社H-シパウラ
環境事業部

日付: 11/21/1/20

作業者 道山敏彦

ONW-10機番: 107

PSA機番: SPS-

客先: 藤見胃腸科

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか	合/否	合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(93.6 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(1.82 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (1.6 Mpa) ~ (2.0 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否	合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)