

百閑医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 井澤-郎

点検年月日	年 月 日	機種名	ONW-10	製造機番	000189
設置場所				TEL	
納入時期	平成15年 10月 日	使用回数	276	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
ランプ類				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄動作				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input checked="" type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸素発生	正常	<input type="checkbox"/>	濃度: 94.5% 流量: 0.8 L/min 圧力: 110 ~ 200 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input checked="" type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常	<input type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>
内部	正常	<input type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/> 交換 <input checked="" type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

20年8月26日
 古岡 宏

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: _____ 作業者 井 澤 郎
ONW-10機番: 000189 PSA機番: SPS-0131 客先: 百閑医院 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.5 %)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.82 L/min)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
PSA圧力の確認 (110 Mpa) ~ (200 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
ドレンチューブは接続したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
インジケータの変色は良好か	合/否	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		