

NE/内科・外科器具科/御中



点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 道山 敏夫

点検年月日	20. 年 10 月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	592.
設置場所				TEL	
納入時期	2025 年 9 月 1 日	使用回数	225.	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 9.1%	流量:	0.28L/min 圧力: 124 ~ 213 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	特に異常は見られず で1に、各部点検済 27.
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
年 月 日 署名 下野 健治			

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HIシバウラ
環境事業部

日付: 1/20/10/16 作業者 道山 敏夫
ONW-10機番: 598 PSA機番: SPS- 客先: 江ノ内科 消化内科 ツエノ 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	☒ 合
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	☒ 合
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	☒ 合
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	☒ 合
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	☒ 合
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	☒ 合
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	☒ 合
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (<u>91.4</u> %)	合/否	☒ 合
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (<u>0.78</u> L/min)	合/否	☒ 合
PSA圧力の確認 (<u>124</u> Mpa) ~ (<u>213</u> Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	☒ 合
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	☒ 合
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	☒ 合
ドレンチューブは接続したか	合/否	☒ 合
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	☒ 合
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	☒ 合
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	☒ 合
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	☒ 合
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	☒ 合
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	☒ 合
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	☒ 合
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	☒ 合
インジケータの変色は良好か	合/否	☒ 合
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		