

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社Hシバウラ
環境事業部

(1)

日付: 2020.12.16 作業者 道山 敏彦

ONW-10機番: 622 PSA機番: SPS-

客先: 西原クリニック

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.6 %)	合/否	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.82 L/min)	合/否	合/否
PSA圧力の確認 (109 Mpa) ~ (197 Mpa)	参考値	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否	合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)